

# 膀胱系统常见问题及解答

## 病人需了解的情况

- 术前准备

手术前的测试需要两到三天，病人通常需要在此之前的几周内接受门诊。

- 关于手术

手术时将全身麻醉，手术时间大约为4-6小时。具体事项请咨询医生。

- 术后情况

手术后的康复过程中个别患者可能会感到轻度不适，您也许会在几天内感到头痛。如果需要，医生会为您开具止痛药。

外科手术后，需要卧床两到三天，或者卧床到坐起时没有任何不适。然后医生要测试膀胱系统并设置程序。一般在接受手术后三到四天就可以开始使用膀胱系统。

- 复查

在手术后的前几周里，医生会在门诊与患者保持密切接触，以确定设备工作正常。通常在手术后要复查3个月，然后每年复查一次。

- 关于植入器械

植入物部分通常不会引起他人的注意。植入式的接受刺激器通常放置在肋骨以下的腹部皮肤下。对于较瘦的人，也许能观察到一个小块。对于平均体重或较胖的身材，植入物通常是看不到的。

在使用该设备的时候,也许会有轻微的感觉。

病人对植入物的排斥非常少见(小于1%)。膀胱系统使用的材料是惰性的，而且都是已经成功地在植入物中使用了多年的材料。膀胱系统的植入部分不含电池，可以使用很多年。